

3D-PRÄZISIONSHARZE

KeySplint Soft® Clear for Carbon® Printers

Reinigungs-und Pflegehinweise



Willkommen zu Ihrem KeySplint Soft Clear for Carbon-Erlebnis. Diese Schiene wurde individuell für Sie hergestellt und soll höchsten Tragekomfort sicherstellen. Tragen Sie Ihre Schiene wie von Ihrem Zahnarzt beschrieben und pflegen Sie Ihre Zähne auch weiterhin durch Putzen und die Anwendung von Zahnseide. Nehmen Sie alle Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt wahr und lassen Sie bei jedem Besuch den Sitz und Zustand Ihrer KeySplint Soft Schiene überprüfen. Sollten in der Zwischenzeit Veränderungen an Ihren Zähnen vorkommen, halten Sie bezüglich der Passform Ihrer Schiene Rücksprache mit Ihrem Zahnarzt. Falls Ihre Schiene drückt oder anderweitige Beschwerden hervorruft, wenden Sie sich zur Nachsorge bitte an Ihren Zahnarzt.

Reinigung und Instandhaltung Ihrer KeySplint Soft® Clear for Carbon® Schiene

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Keystone Industries empfiehlt, Ihre Schiene täglich vor und nach jedem Tragen zu reinigen. Entfernen Sie Speichel und Rückstände von der Schiene unmittelbar nach dem Herausnehmen mit warmem Wasser (nicht heißer als 45 °C) und etwas Seife.

2. VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN

Für die regelmäßige Entfernung von Rückständen und die Reinigung Ihrer Schiene können Sie schonende, freiverkäufliche Reinigungsmittel verwenden, die speziell für die Reinigung von Dentalvorrichtungen angeboten werden. Bei Bedarf können Sie außerdem einen weichen Borstenpinsel nutzen, um die Innenseiten Ihrer Schiene von Rückständen zu befreien. Zu den geeigneten Reinigungsmitteln zählen Geschirrspülmittel, Corega-Tabs, Efferdent, 3-prozentige Peroxidlösung, 15-prozentige Bleichmittellösung und Mundwasser.

3. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lassen Sie Ihre Schiene **NIE LÄNGER** als 1 Stunde in einer Reinigungsflüssigkeit
- Verwenden Sie **KEINE** Reinigungsmittel mit Schleifkörpern (z. B. Zahnpasta), da dies die Lebensdauer Ihrer Schiene beeinträchtigen könnte.
- Entsorgen Sie die Reinigungslösung nach jeder Nutzung. Spülen Sie die Schiene vor jedem Tragen gründlich ab.
- **TAUCHEN SIE** die Schiene **NICHT** in Wasser, das heißer ist als 45 °C (113 °F), da sich die Schiene sonst verziehen könnte.

Keystone Industries rät vom Essen oder Trinken mit eingesetzter Schiene ab. Der Verzehr heißer Getränke könnte die Passform der Vorrichtung beeinträchtigen. Bitte nehmen Sie die Vorrichtung vor jeder Mahlzeit heraus, um eine optimale Leistung, Passform und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Bitte seien Sie im Umgang mit Ihrer KeySplint Soft Clear for Carbon Schiene stets vorsichtig. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schiene völlig trocken ist, bevor Sie sie in der Schale lagern. Nur so können Sie der Bakterienbildung vorbeugen.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 USA
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Deutschland



**BITTE BEACHTEN SIE
UNSERE MEHRSPRACHIGEN
PFLEGEHINWEISE**