

RÉSINES 3D DE PRÉCISION

KeySplint

Instructions de nettoyage et d'entretien



Bienvenue. Vous allez vivre l'expérience KeySplint. Cette attelle a été conçue pour votre confort et personnalisée pour répondre à vos besoins. Portez votre attelle conformément aux instructions de votre dentiste et continuez à vous laver les dents et à utiliser du fil dentaire après chaque repas. Continuez à prendre régulièrement rendez-vous chez votre dentiste et assurez-vous que votre appareil est toujours bien ajusté et qu'il est en bon état lors de chaque visite. En cas de nouveaux soins dentaires, demandez à votre dentiste si votre appareil est toujours bien ajusté. Si vous ressentez une quelconque gêne ou une pression particulière, contactez votre dentiste pour planifier un rendez-vous de contrôle.

Nettoyage et entretien de votre appareil dentaire KeySplint

1. NETTOYAGE QUOTIDIEN

Keystone Industries vous recommande de nettoyer quotidiennement votre appareil, avant et après chaque utilisation. Lorsque vous le retirez, lavez-le immédiatement à l'eau chaude et au savon (sans dépasser les 45°C [113°F]) pour éliminer tout résidu de salive et de débris sur l'appareil.

2. UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE

Lors de vos entretiens périodiques et de l'élimination régulière des débris, vous pouvez utiliser les produits de nettoyage disponibles en vente libre qui ont été spécialement conçus pour le nettoyage d'appareils dentaires. Si besoin, utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer l'intérieur de votre appareil et éliminer les débris. Les produits de nettoyage suivants peuvent convenir : liquide vaisselle Dawn, Polident, Efferdent, solution de peroxyde à 3%, solution d'eau de Javel à 15% et bain de bouche.

3. MISES EN GARDE

- **NE LAISSEZ PAS TREMPER** votre appareil dans du liquide pendant plus d'une heure.
- **N'UTILISEZ PAS** de produits de nettoyage abrasifs (par exemple, du dentifrice) car cela pourrait réduire la durée de vie de votre appareil.
- Jetez votre solution de nettoyage après chaque utilisation. Rincez bien votre appareil avant de le remettre.
- **NE LAISSEZ PAS TREMPER** votre appareil dans de l'eau dont la température est supérieure à 45°C (113°F) au risque qu'il se déforme.

Keystone Industries vous déconseille de manger ou de boire lorsque vous portez l'appareil. Si vous consommez une boisson chaude, il est possible que vous deviez ensuite réajuster votre appareil. Veuillez retirer votre appareil avant de manger pour être certain qu'il fonctionne toujours de manière optimale, reste bien ajusté et a une longue durée de vie. Manipulez toujours votre appareil KeySplint avec soin. N'oubliez pas de bien le sécher avant de le ranger dans son étui afin d'éviter le développement de bactéries.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 É.-U.
Stockholzstr. 11, D-78224 Sigen, Allemagne



RETROUVEZ NOUS SUR
NOTRE SITE WEB KEYPRINT
POUR EN SAVOIR PLUS